

## **mx™ KINEZIO TAPE 5CM X 5CM Vágható**

*ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ—Termék ismertető és Használati Útmutató*

A kineziológiai szalagot úgy tervezték, hogy támogassa az izmokat és az ízületeket, alkalmas a gyulladás és a fájdalom kezelésére.

Az mx™ Kineziológiai szalag ideális a sérülések megelőzésére, a fájdalom kezelésére és az újbóli sérülések elleni védelemre. A szalag teljes mozgástartományt tesz lehetővé, hipoallergén, latexmentes, vízálló, és egyedileg vágható, hogy megfeleljen az alkalmazások széles skálájának. A szalag nem korlátoz, lehetővé teszi a mozgást a teljes mozgástartományban.

A szalagot tiszta, száraz bőrre kell felvinni egy órával a sportolás előtt. Ez lehetővé teszi, hogy a ragasztóanyag teljesen megtapadjon. Minden alkalmazás legfeljebb három napig viselhető. Tekintse meg ezt a tájékoztatót, hogy útmutatást adjon a konkrét sérülések esetén történő alkalmazáshoz. Javasoljuk, hogy szakképzett fizioterapeutával konzultáljon a helyes alkalmazás érdekében.

Ne használja a szalagot irritált bőrön vagy nyílt sebekben. Bőrirritáció esetén távolítsa el a szalagot, és szükség esetén kérjen orvosi segítséget. Tartós vagy komolyabb sérülés esetén forduljon orvoshoz. Őrizze meg ezt az adatlapot későbbi hivatkozás céljából. Ha a megfelelő szalaghosszúságot levágta, az használatra kész.

A gyártási időt lásd a csomagoláson!

**Minőségét megőrzi 5 évig.**

**Gyártó:** MEDINOX LONDON LTD. UK

**Forgalmazza:** AIM-Medical Kft., 1158 Rákospalotai Határút u. 2.

Tel: +36 1 4146 491, info@aim-medical.hu