

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### **mx® PRÉMIUM UNIVERZÁL CSUKLÓRÖGZÍTŐ - UNIVERZÁL/UNIVERSAL PLUS MÉRET S/M/L és L/XL/2XL (Orvostechnikai eszköz)**

Az **mx® PREMIUM UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐK** a gyenge, ízületi gyulladással vagy sérült izmok és ízületek megbízható támogatására szolgálnak. Az SBR (rugalmas gumi) anyag megőrzi a test természetes melegét, hogy enyhülést nyújtson és elősegítse a gyógyulást.

#### **mx® PREMIUM UNIVERSAL Rögzítők:**

- Közepes/Erős rögzítést nyújt, elősegíti a sérült vagy legyengült izmok és ízületek kezelését és a sérülés megelőzését
- Állítható MÉRET
- Bal vagy jobb csuklóhoz is illeszkedik
- A 3D kialakítás rögzítést biztosít, segít csökkenteni a duzzanatot
- Könnyű és tartós
- nem korlátozza a mozgást

#### **Megjegyzés:**

A rögzítőket megfelelően méretezni kell a maximális használhatóság és a túlzott összenyomás elkerülése érdekében. Ha a rögzítőket sérülés után használják, forduljon orvoshoz amennyiben 72 órán belül nem tapasztalható javulás az állapotában. Ha a sérülés súlyos, vagy ha kétségei vannak, azonnal forduljon orvoshoz. Ha gyermekek használják, felnőtt felügyelete szükséges. Kisgyermekek elől elzárva tartandó.

#### **Mosási útmutató:**

Kézi mosás langyos szappanos vízzel és levegőn szárítva.

#### **Figyelem:**

Súlyos vagy tartós sérülések esetén orvoshoz kell fordulni. Ez a termék allergiás reakciókat válthat ki azoknál, akik érzékenyek a latexre. Ha fájdalom vagy kiütés lép fel, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon orvoshoz. Őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából.

### **mx® PRÉMIUM UNIVERZÁL CSUKLÓRÖGZÍTŐ - UNIVERZÁL/UNIVERSAL PLUS MÉRET ( S/M/L és L/XL/2XL)**

#### **(Orvostechnikai eszköz)**

#### **Termék ismertető és Használati Útmutató**

Az **mx® PREMIUM UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐK** a gyenge, ízületi gyulladással vagy sérült izmok és ízületek megbízható támogatására szolgálnak. Az SBR (rugalmas gumi) anyag megőrzi a test természetes melegét, hogy enyhülést nyújtson és elősegítse a gyógyulást.

- Közepes/Erős rögzítést nyújt, elősegíti a sérült vagy legyengült izmok és ízületek kezelését és a sérülés megelőzését
- Állítható méret
- Bal vagy jobb csuklóhoz is illeszkedik
- A 3D forma tömörítést biztosít, segít csökkenteni a duzzanatot
- Könnyű és tartós
- nem korlátozza a mozgást

**Minden nap:** Mindennapi használatra alkalmas, **Sport:** Sportolásra alkalmas, **Anatómiai kialakítás:** célzott rögzítést biztosít, **Rehabilitáció:** elősegíti a műtét vagy sérülés utáni rehabilitációt, **Hő visszatartás:** Segíti a gyógyulási folyamatot **Súlyos vagy tartós sérülések esetén orvoshoz kell fordulni.** Ez a termék allergiás reakciókat válthat ki azoknál, akik érzékenyek a latexre. Ha fájdalom vagy kiütés lép fel, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon orvoshoz. Őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából.

**Anyaga: 60% gumi, 20% nylon, 20% poliészter**

**UNIVERZÁL MÉRET: S/M/L** Mérje meg a csukló körül, 13cm - 22cm-es méretnek megfelelő.

**UNIVERZÁL PLUS MÉRET: L/XL/2XL** Mérje meg a csukló körül, 19cm - 28cm-es méretnek megfelelő..

**Rögzítés erőssége: 3 – 4 fokozat, közepestől az erősig (lásd a dobozon)**

#### **Mosási útmutató:**

Kézi mosás langyos szappanos vízzel és levegőn szárítva.

**Gyártó:** medinox® LONDON, UK

Solar House 282 Chase-Road, LondonN146NZ ; [www.medinox.co.uk](http://www.medinox.co.uk)

**Forgalmazó:** AIM-Medical Kft, 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2. Tel: +36 1 4146 491, [info@aim-medical.hu](mailto:info@aim-medical.hu)