

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

mx® PRÉMIUM UNIVERZÁL TÉRDRÖGZÍTŐ - UNIVERZÁL/UNIVERSAL PLUS

MÉRET S/M/L és XL/XXL/XXXL (Orvostechikai eszköz)

Az **mx® PREMIUM UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐK** a gyenge, ízületi gyulladással vagy sérült izmok és ízületek megbízható támogatására szolgálnak. Az SBR (rugalmas gumi) anyag megőrzi a test természetes melegét, hogy enyhülést nyújtson és elősegítse a gyógyulást.

mx® PREMIUM UNIVERSAL Rögzítők:

- Közepes/Erős rögzítést nyújt, elősegíti a sérült vagy legyengült izmok és ízületek kezelését és a sérülés megelőzését
- Állítható méret
- Bal vagy jobb térdhez is illeszkedik
- A 3D forma tömörítést biztosít, segít csökkenteni a duzzanatot
- könnyű és tartós
- nem korlátozza a mozgást

Megjegyzés:

A rögzítőket megfelelően méretezni kell a maximális használhatóság és a túlzott összenyomás elkerülése érdekében. Ha a rögzítőket sérülés után használják, forduljon orvoshoz amennyiben 72 órán belül nem tapasztalható javulás az állapotában. Ha a sérülés súlyos, vagy ha kétségei vannak, azonnal forduljon orvoshoz. Ha gyermekek használják, felnőtt felügyelete szükséges. Kisgyermekek elől elzárva tartandó.

Mosási útmutató:

Kézi mosás langyos szappanos vízzel és levegőn szárítva.

Figyelem:

Súlyos vagy tartós sérülések esetén orvoshoz kell fordulni. Ez a termék allergiás reakciókat válthat ki azoknál, akik érzékenyek a latexre. Ha fájdalom vagy kiütés lép fel, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon orvoshoz. Őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából.

mx® PRÉMIUM UNIVERZÁLIS TÉRDRÖGZÍTŐ - UNIVERZÁL/UNIVERSAL PLUS

MÉRET S/M/L és XL/XXL/XXXL (Orvostechikai eszköz)

Termék ismertető és Használati Útmutató

Az **mx® PREMIUM UNIVERZÁL RÖGZÍTŐK** a gyenge, ízületi gyulladással vagy sérült izmok és ízületek megbízható támogatására szolgálnak. Az SBR (rugalmas gumi) anyag megőrzi a test természetes melegét, hogy enyhülést nyújtson és elősegítse a gyógyulást.

- Közepes/Erős rögzítést nyújt, elősegíti a sérült vagy legyengült izmok és ízületek kezelését és a sérülés megelőzését
- Állítható méret
- Bal vagy jobb térdhez is illeszkedik
- A 3D forma tömörítést biztosít, segít csökkenteni a duzzanatot
- Könnyű és tartós
- nem korlátozza a mozgást

Minden nap: Mindennapi használatra alkalmas, **Sport:** Sportolásra alkalmas, **Anatómiai kialakítás:** célzott rögzítést biztosít, **Rehabilitáció:** elősegíti a műtét vagy sérülés utáni rehabilitációt, **Hő visszatartás:** Segíti a gyógyulási folyamatot **Súlyos vagy tartós sérülések esetén orvoshoz kell fordulni.** Ez a termék allergiás reakciókat válthat ki azoknál, akik érzékenyek a latexre. Ha fájdalom vagy kiütés lép fel, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon orvoshoz. Őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából.

Anyaga: 60% gumi, 20% nylon, 20% poliészter

UNIVERZÁLIS MÉRET: S/M/L Mérje meg a térd körül, 24cm - 43 cm-es méretnek megfelelő.

UNIVERZÁL PLUS MÉRET: L/XL/2XL Mérje meg a térd körül, 43cm - 57 cm-es méretnek megfelelő.

Rögzítés erőssége: 3 – 4 fokozat, közepestől az erősig (lásd a dobozon)

Mosási útmutató:

Kézi mosás langyos szappanos vízzel és levegőn szárítva.

Gyártó: medinox® LONDON, UK

Solar House 282 Chase-Road, LondonN146NZ ; www.medinox.co.uk

Forgalmazó: AIM-Medical Kft, 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2. Tel: +36 1 4146 491, info@aim-medical.hu