

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### **mx® STANDARD ELASZTUKUS BOKARÖGZÍTŐ ( S – M – L – XL – XXI – XXXL)**

#### **Orvostechnikai eszköz**

**Az mx® elasztikus rögzítőket** úgy tervezték, hogy támogatást nyújtsanak a sérült vagy legyengült izmoknak és ízületeknek. Az érintett terület gyengéd összenyomása csökkentheti a duzzanatot és megelőzheti a további sérüléseket.

#### **mx® rugalmas rögzítők:**

- Közepes szintű támogatást nyújt
- jobb vagy bal bokára is illeszkedik
- nem korlátozza az edzést
- ruha alatt is hordható
- elasztikus puha anyagból készült, amely biztosítja, hogy a támaszték tartós, légáteresztő és kényelmes legyen
- alkalmas férfiak és nők számára

#### **Megjegyzés:**

A rögzítőket megfelelően méretezni kell a maximális használhatóság és a túlzott összenyomás elkerülése érdekében. Ha a rögzítőket sérülés után használják, forduljon orvoshoz amennyiben 72 órán belül nem tapasztalható javulás az állapotában. Ha a sérülés súlyos, vagy ha kétségei vannak, azonnal forduljon orvoshoz. Ha gyermekek használják, felnőtt felügyelete szükséges. Kisgyermekek elől elzárva tartandó.

#### **Mosási útmutató:**

Kézi mosás langyos szappanos vízzel és levegőn szárítva.

#### **Figyelem:**

Súlyos vagy tartós sérülések esetén orvoshoz kell fordulni. Ez a termék allergiás reakciókat válthat ki azoknál, akik érzékenyek a latexre. Ha fájdalom vagy kiütés lép fel, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon orvoshoz. Őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából.

**Gyártó:** medinox® LONDON, UK

Solar House 282 Chase-Road, LondonN146NZ ; [www.medinox.co.uk](http://www.medinox.co.uk)

**Forgalmazó:** AIM-Medical Kft, 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2. Tel: +36 1 4146 491,  
[info@aim-medical.hu](mailto:info@aim-medical.hu)