

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ és TERMÉK ISMERTETŐ

### **mx® STANDARD ELASZTUKUS CSUKLÓRÖGZÍTŐ ( S – M – L – XL – XXI – XXL - XXL) Orvostechnikai eszköz**

Az **mx® elasztikus rögzítőket** úgy tervezték, hogy támogatást nyújtsanak a sérült vagy legyengült izmoknak és ízületeknek. Az érintett terület gyengéd összenyomása csökkentheti a duzzanatot és megelőzheti a további sérüléseket.

#### **mx® rugalmas rögzítők:**

- Közepes szintű támogatást nyújt
- jobb vagy bal csuklóra is illeszkedik
- nem korlátozza az edzést
- ruha alatt is hordható
- elasztikus puha anyagból készült, amely biztosítja, hogy a támaszték tartós, légáteresztő és kényelmes legyen
- alkalmas férfiak és nők számára

#### **Megjegyzés:**

A rögzítőket megfelelően méretezni kell a maximális használhatóság és a túlzott összenyomás elkerülése érdekében. Ha a rögzítőket sérülés után használják, forduljon orvoshoz amennyiben 72 órán belül nem tapasztalható javulás az állapotában. Ha a sérülés súlyos, vagy ha kétségei vannak, azonnal forduljon orvoshoz. Ha gyermekek használják, felnőtt felügyelete szükséges. Kisgyermekek elől elzárva tartandó.

#### **Mosási útmutató:**

Kézi mosás langyos szappanos vízzel és levegőn szárítva.

#### **Figyelem:**

Súlyos vagy tartós sérülések esetén orvoshoz kell fordulni. Ez a termék allergiás reakciókat válthat ki azoknál, akik érzékenyek a latexre. Ha fájdalom vagy kiütés lép fel, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon orvoshoz. Őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából.

**Légáteresztő:** légáteresztő anyaga lehetővé teszi a nedvesség távozását

**Minden nap:** mindennapi használatra alkalmas

**Sport:** sportolásra alkalmas:

**2 irányú megnyúlás:** kiváló minőségű szőtt elasztikus anyag

**Rehabilitáció:** elősegíti a műtét vagy sérülés utáni rehabilitációt

#### **Anatómiai kialakítás**

anyaga: 54% poliészter, 46% elasztikus

Kérjen orvosi tanácsot súlyos vagy tartós sérülések esetén. Ez a termék allergiás reakciókat válthat ki azoknál, akik érzékenyek a latexre. Ha fájdalom vagy kiütés lép fel, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz. Őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából.

#### **Méret táblázat:**

Mérje meg a csukló körül

kicsi (S):	13cm - 16cm
közepes (M):	16cm - 19cm
nagy (L):	19cm - 22cm
XL:	22cm - 25cm
XX-L:	25cm - 28cm
XXX-L	28cm - 31cm

#### **Mosási útmutató:**

Kézi mosás langyos szappanos vízzel és levegőn szárítva.

**Gyártó:** medinox® LONDON, UK

Solar House 282 Chase-Road, LondonN146NZ ; [www.medinox.co.uk](http://www.medinox.co.uk)

**Forgalmazó:** AIM-Medical Kft, 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2. Tel: +36 1 4146 491, [info@aim-medical.hu](mailto:info@aim-medical.hu)