

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

mx® STANDARD ELASZTUKUS KÖNYÖK RÖGZÍTŐ (S – M – L – XL – XXI – XXL) Orvostechnikai eszköz

Az **mx® elasztikus rögzítőket** úgy tervezték, hogy támogatást nyújtsanak a sérült vagy legyengült izmoknak és ízületeknek. Az érintett terület gyengéd összenyomása csökkentheti a duzzanatot és megelőzheti a további sérüléseket.

mx® rugalmas rögzítők:

- Közepes szintű támogatást nyújt
- jobb vagy bal könyökre is illeszkedik
- nem korlátozza az edzést
- ruha alatt is hordható
- elasztikus puha anyagból készült, amely biztosítja, hogy a támaszték tartós, légáteresztő és kényelmes legyen
- alkalmas férfiak és nők számára

Megjegyzés:

A rögzítőket megfelelően méretezni kell a maximális használhatóság és a túlzott összenyomás elkerülése érdekében. Ha a rögzítőket sérülés után használják, forduljon orvoshoz amennyiben 72 órán belül nem tapasztalható javulás az állapotában. Ha a sérülés súlyos, vagy ha kétségei vannak, azonnal forduljon orvoshoz. Ha gyermekek használják, felnőtt felügyelete szükséges. Kisgyermekek elől elzárva tartandó.

Mosási útmutató: Kézi mosás langyos szappanos vízzel és levegőn szárítva.

Figyelem: Súlyos vagy tartós sérülések esetén orvoshoz kell fordulni. Ez a termék allergiás reakciókat válthat ki azoknál, akik érzékenyek a latexre. Ha fájdalom vagy kiütés lép fel, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon orvoshoz. Őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából.

Légáteresztő: légáteresztő anyaga lehetővé teszi a nedvesség távozását

Minden nap: mindennapi használatra alkalma. **Sport:** sportolásra alkalmas:

2 irányú megnyúlás: kiváló minőségű szőtt elasztikus anyag. **Rehabilitáció:** elősegíti a műtét vagy sérülés utáni rehabilitációt. **Anatómiai kialakítás**

anyaga: 54% poliészter, 46% elasztikus

Kérjen orvosi tanácsot súlyos vagy tartós sérülések esetén. Ez a termék allergiás reakciókat válthat ki azoknál, akik érzékenyek a latexre. Ha fájdalom vagy kiütés lép fel, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz. Őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából.

Mérettáblázat: (Mérje meg a könyök közepe körül)

kicsi (S): 18cm – 22,5cm

közepes (M): 22,5cm - 27cm

nagy (L): 27cm – 31,5cm

XL: 31,5cm - 36cm

XX-L: 36cm – 40,5cm

Mosási útmutató:

Kézi mosás langyos szappanos vízzel és levegőn szárítva. **Gyártó:** medinox® LONDON, UK
Solar House 282 Chase-Road, LondonN146NZ ; www.medinox.co.uk

Forgalmazó: AIM-Medical Kft, 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2. Tel: +36 1 4146 491,
info@aim-medical.hu