

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### **mx® STANDARD ELASZTUKUS TÉRDRÖGZÍTŐ ( S – M – L – XL – XXI – XXL - XXL) Orvostechnikai eszköz**

Az **mx® elasztikus rögzítőket** úgy tervezték, hogy támogatást nyújtsanak a sérült vagy legyengült izmoknak és ízületeknek. Az érintett terület gyengéd összenyomása csökkentheti a duzzanatot és megelőzheti a további sérüléseket.

#### **mx® rugalmas rögzítők:**

- Közepes szintű támogatást nyújt
- jobb vagy bal térdre is illeszkedik
- nem korlátozza az edzést
- ruha alatt is hordható
- elasztikus puha anyagból készült, amely biztosítja, hogy a támaszték tartós, légáteresztő és kényelmes legyen
- alkalmas férfiak és nők számára

**Megjegyzés:** A rögzítőket megfelelően méretezni kell a maximális használhatóság és a túlzott összenyomás elkerülése érdekében. Ha a rögzítőket sérülés után használják, forduljon orvoshoz amennyiben 72 órán belül nem tapasztalható javulás az állapotában. Ha a sérülés súlyos, vagy ha kétségei vannak, azonnal forduljon orvoshoz. Ha gyermekek használják, felnőtt felügyelete szükséges. Kisgyermekek elől elzárva tartandó.

**Mosási útmutató:** Kézi mosás langyos szappanos vízzel és levegőn szárítva.

**Figyelem:** Súlyos vagy tartós sérülések esetén orvoshoz kell fordulni. Ez a termék allergiás reakciókat válthat ki azoknál, akik érzékenyek a latexre. Ha fájdalom vagy kiütés lép fel, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon orvoshoz. Őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából.

**Légáteresztő:** légáteresztő anyaga lehetővé teszi a nedvesség távozását

**Minden nap:** mindennapi használatra alkalmas. **Sport:** sportolásra alkalmas:

**2 irányú megnyúlás:** kiváló minőségű szőtt elasztikus anyag. **Rehabilitáció:** elősegíti a műtét vagy sérülés utáni rehabilitációt. **Anatómiai kialakítás**

anyaga: 54% poliészter, 46% elasztikus

Kérjen orvosi tanácsot súlyos vagy tartós sérülések esetén. Ez a termék allergiás reakciókat válthat ki azoknál, akik érzékenyek a latexre. Ha fájdalom vagy kiütés lép fel, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz. Őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából.

#### **Méret táblázat:**

Mérje meg a térd közepe körül

kicsi (S): 30cm – 36cm

közepes (M): 36cm - 42cm

nagy (L): 42cm - 48cm

XL: 48cm - 54cm

XX-L: 54cm – 60cm

XXX-L 60cm – 66cm

**Mosási útmutató:** Kézi mosás langyos szappanos vízzel és levegőn szárítva.

**Gyártó:** medinox® LONDON, UK

Solar House 282 Chase-Road, LondonN146NZ ; [www.medinox.co.uk](http://www.medinox.co.uk)

**Forgalmazó:** AIM-Medical Kft, 1158 Budapest, Rákospalota határút 2. Tel: +36 1 4146 491,

[info@aim-medical.hu](mailto:info@aim-medical.hu)