

MX75301 Kartartó heveder

Termékismertető és Használati Útmutató

Az mx® Kartartó hevedert úgy tervezték, hogy: hatékonyan támasztja meg a kart a törések és ficamok utáni felépülés, a kar vagy a kéz műtétei során, valamint biztosítja a váll mozdulatlanságát. Elősegíti a rehabilitációt a műtét vagy a sérülés után. Az állítható pánt lehetővé teszi, hogy a kar teljes súlyát a hevederben hordozza. A kartartó heveder könnyű anyagból készült, amelyet a kényelem és a tartósság érdekében terveztek.

Méret: Egy méret – Univerzális felnőtt méret.

Rögzítés: 2 fokozat

Mindennapi használatra alkalmas.

Az mx® Kartartó heveder:

- ortopédiai támogatást nyújt
- enyhe alátámasztást biztosít egy sérült alkar vagy váll esetén
- párnázott vállpántja van
- állítható rögzítéssel rendelkezik
- könnyű és tartós

Használati utasítás: Helyezze az alkarját a hevederbe és rögzítse a hevedert a nyak körül úgy, hogy a csukló enyhén, körülbelül 20 fokkal megemelkedjen a könyöktől. Szükség szerint állítsa be a pántot a kényelmes illeszkedés érdekében.

Megjegyzés: A hevedert helyesen kell méretezni a maximális haszon és a túlnyomás elkerülése érdekében. Ha a hevedert sérülés után használják, kérjen tanácsot ha 72 órán belül nem tapasztalható javulás az állapotában. Ha a sérülés súlyos, vagy ha kétségei vannak, azonnal forduljon orvoshoz. Ha gyermekek használják, felnőtt felügyelete szükséges. Kisgyermekek elől elzárva tartandó.

Mosási útmutató: Kézi mosás langyos szappanos vízzel és levegőn szárítva.

Figyelmeztetés: Súlyos vagy tartós sérülések esetén orvoshoz kell fordulni. Ritka esetekben a termékben lévő anyagok egyes személyeknél allergiás reakciót válthatnak ki. Ha fájdalom vagy kiütés lép fel, hagyja abba a használatát. Ha az irritáció továbbra is fennáll, kérjen tanácsot. Őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából.

Gyártó: medinox® LONDON, UK Solar House 282 Chase-Road, LondonN146NZ ;
www.medinox.co.uk

Forgalmazó: AIM-Medical Kft, 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2.
Tel: +36 1 4146 491, info@aim-medical.hu