



Kérjük figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót.

ADATOK

Minimum mérési tartomány: 35,5 °C – 42,0 °C

Mérés felosztás: 0,1 °C

Mérési pontosság: 0,1 °C / -0,15 °C

Működési körülmények: Hőmérséklet: -15 °C és 42 °C között (használata szobahőmérsékleten ajánlott).

Tárolási feltételek: -15 °C és 42 °C között tárolandó.

Felhasználás célja: Folyadékkal töltött hőmérő egészségügyi használatra mely a testhőmérsékletet méri. Hőmérő csúcsértékkijelzővel, analóg leolvasással és galinstan tartalommal.

Jellemző: A hőmérő a gyártásnál és a teszteken megfelelt az alábbi direktíváknak, szabványoknak. 93/42 / EGK tanács irányelv.

EN 12470-1 - Klinikai hőmérők, 1. rész: Folyékony anyaggal töltött fém-üveg hőmérők csúcsértékkijelzővel.

GALINSTAN - ÚJ FOLYADÉK, AMELY NEM MÉRGEZŐ ÉS KÖRNYEZETBARÁT

A higanymentes VedoEco hőmérőt a GERATHERM Medical AG fejlesztette ki és egy szabadalmaztatott folyékony ötvözetet tartalmaz, mely galliumból, indiumból és ólomból tevődik össze, neve Galinstan. A Galinstan 100%-osan nem mérgező és környezetbarát.



ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ne ejtse le vagy üsse oda a hőmérőt.
2. Ne törje meg és harapja el a hőmérő hegyét.
3. Gyermekektől távol tartandó.
4. A hőmérő üvegének károsodása esetén ne használja tovább (fennáll a sérülés veszélye).
5. FIGYELEM: A gyermekeket a teljes használati idő alatt felügyelet alatt kell tartani.
6. A folyékony galinstan nem érintkezhet nemes vagy könnyű fémekkel a kölcsönhatás veszélye miatt.
7. Legyen óvatos a mérés során a sérülések elkerülése érdekében.
8. A hőmérő használata nem zárja ki annak szükségességét, hogy orvoshoz forduljon. A tartós láz, különösen gyermekek esetében orvosi ellátást igényel.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Mielőtt használja a hőmérőt, győződjön meg arról, hogy a folyadékoszlopban 36 °C fok alatti érték jelenjen meg.
2. Tisztítsa meg a hőmérőt használat előtt és után. Kövesse gondosan a „TISZTÍTÁSI ÉS FERTŐTLENÍTÉSI FIGYEL-MEZTETÉSEK” részben leírtakat.
3. Helyezze a hőmérőt a megfelelő helyre a mérés típusa szerint (hónalj, rektális vagy orális)
4. A hőmérő a testhőmérséklet körülbelül 4 perc alatt méri meg és a galinstan tartalom az eszközön megmu-tatja a mért testhőmérsékletet.
Fordítsa el kissé a hőmérőt, hogy könnyebben le tudja olvasni a hőmérsékletet.
5. A mérés után a hőmérő mutatóját vissza kell állítani 36 °C alá. Ehhez tegye vissza a hőmérőt a lerázó tokba. Figyeljen arra, hogy a hőmérő vége is megfelelően a helyére kerüljön. Majd fogja meg a tok végét és rázza le a gyors, ritmusos mozdulatokkal a hőmérőt, addig míg a folyadékoszlop az első számított érték alá esik.



Mindig fertőtlenítse a hőmérőt használat előtt és után. Kórházakban a fertőtlenítést mindig a szakszemélyzetnek kell elvégeznie.

ELFOGADOTT TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉSI MÓDSZEREK

ORÁLIS - Mérési idő: min. 4 perc, normál hőmérséklet: kb. 37 °C

Helyezze a hőmérő szárát a nyelve alá, bal vagy jobb oldalra, a hőpontok egyikéhez.

REKTÁLIS - Mérési idő: min. 4 perc, normál hőmérséklet: kb. 37,6 °C

A rektális hőmérés sokkal jobb mérési módszer a gyermekek számára. A hőmérő végét (szonda) be kell helyezni nem több mint 2 cm mélyre a végbélnyílásba. Ha szükséges, testápolót vagy babaolajat lehet kenni a hőmérő végére (a fedél eltávolítása után).



Azonnal hagyja abba, ha a felhelyezés ellenállásba ütközik.

HÓNALJ - Mérési idő: min. 4 perc, normál hőmérséklet: kb. 36,7 °C

A hónalj mérés nem ad olyan pontos értéket, mint az orális és rektális mérés.

Törölje meg a hónaljat száraz ronggyal, és helyezze a hőmérő végét a hónaljba és szorítsa a karját a testéhez.

Rektális mérésnél a mért értékből 0,9 °C-ot, míg orális mérésnél 0,4 °C-ot le kell vonni, hogy megkapjuk a pontos hőmérsékletet.

TISZTÍTÁSI ÉS FERTŐTLENÍTÉSI FIGYELMEZTETÉSEK

A hőmérő higiénikusan lezárt üvegborításban van, így korlátlanul fertőtleníthető. A tisztító és fertőtlenítőszer hőmérséklete nem haladhatja meg a 42 °C-ot.

Hideg szappanos vízzel tisztítsa meg a hőmérőt használat előtt és után.

Fertőtlenítse a hőmérőt alkohollal vatta vagy rongy segítségével, vagy mártsa a hőmérőt egy fertőtlenítő oldatba (merítési idő a gyártó utasításai szerint). Ha a hőmérő eltörik a kiömlött folyadékok törölje le szappanos vízzel, szivaccsal vagy ronggyal majd dobja ki a háztartási hulladékba.

A hőmérő kalibrálást nem igényel.

ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK

	Kövesse a használati utasításban leírtakat.		Hőmérsékleti határértékek: -15 °C és +42 °C között tárolandó
	Figyelmeztetés		Száraz helyen tárolja.
	LOT szám (hónap / év) A hőmérő üvegborításának hátoldalán lézeres gravírozású LOT szám található		Törékeny, óvatosan kezelendő
	Gyártó	N	Mennyiség

 Geratherm Medical AG
Fahrenheitstrasse 1
D-98716 Geschwenda
GERMANY
REF. 00 023015 010 100

Forgalmazó:
AIM-Medical Kft.
Levelezési cím: 1158 Budapest,
Rákospalota határút 2.
Tel.: 06-1/4146-491, fax: 06-1/4146-492
www.aim-medical.hu • info@aim-medical.hu