

## **PiC AirChamber antisztatikus légzőkamra**

**(Arcmaszk 100% szilikon) méret: S / M / L (lásd a dobozon)**

### **Használati utasítás**

Az AirChamber-t arra szánják, hogy a betegeknek **asztma és COPD kezelésére** szolgáló gyógyszereket adjanak be legtöbbször nyomás alatti, mért dózisu inhalációból, amelyet orvos vagy egészségügyi szakember ír fel otthoni, vagy kórházi használatra.

Az AirChamber közvetlenül a csomagolásból használható, majd havonta tisztítandó a túlooldalonal található utasítások szerint. Az AirChamber egyetlen beteg általi használatra készült. Több beteg közötti használat keresztszennyeződést okozhat.

1. Távolítsa el a kupakot az inhalátorról, és jól áztassa ki
2. Nyomja az inhalátort az AirChamber alján
3. Helyezze be a fúvókát légmentesen a szájba , nyomja meg az inhalátort és finom permetet fog látni az AirChamber belsejében. Vegyünk egy lassú, mély lélegzetet a szájon keresztül és tartsuk 5-10 másodpercig, vagy folytassuk a be- és kilégzést az AirChamber-en keresztül 4-6 légzésig.
4. Várjon legalább egy percet, mielőtt megismételné a 3. lépést. Egyszerre csak egy adagot használjon az inhalátorból:
5. Ha maszkra van szükség, rögzítse az AirChamberhez. Erősen rögzítse a maszkot a távtartó szájrészéhez, és helyezze a maszkot a szájra és az orra. Győződjön meg arról, hogy a kapcsolat mindig biztonságos. Ellenőrizze a hatékony tömítést.

### **Kérjük, vegye figyelembe:**

Mindig kövesse az asztmás inhalátorhoz mellékelt utasításokat.

A tárolási és a működési tartomány 5°C-40°C (41°F-104°F) 15-90% relatív páratartalom mellett.

Használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak, törött vagy elhasználódott alkatrészek.

Azonnal cserélje ki az AirChambert, ha bármilyen sérülés vagy hiányzó alkatrész látható.

Ellenőrizze, hogy a szelep a szájrészben mozog-e be- és kilégzésekor.

### **Szilikon arcmaszk:**

Nem tartalmaz BPA-t vagy természetes gumit, latexet .

Figyelmeztetés: A maszkot szabványos 22 mm-es átmérőjű csatlakozóval szerelték fel

Biztosítsa a megfelelő csatlakozást használatkor.

1. Vegye ki a maszkot a dobozból/táskából
2. Csatlakoztassa a maszkot a légzőkészülékhez
3. Győződjön meg arról, hogy a kapcsolat biztonságos
4. Helyezze a maszkot az arcra és ellenőrizze a hatékony tömítést.

### **Megjegyzés:**

Ha bármilyen kétsége van a maszk meghibásodása miatt, azonnal cserélje ki a maszkot.

A szilikon arcmaszk nem természetes gumi latexből készült

A maszk az általános szeméttel együtt dobható ki.

Használat előtt mindenképpen kérdezze meg kezelő orvosát a helyes alkalmazásról.

**Tisztítás:**

1. Az AirChamber közvetlenül a csomagból használható, majd havonta legalább egyszer ki kell takarítani, de szükség esetén gyakrabban is mosható.
2. távolítsa el az alap korongot úgy, hogy a hüvelyk ujját helyezze a lyukba, húzza és csavarja egyszerre. Nincs szükség a szájfúvóka szétszerelésére.
3. lágy, folyékony mosószerrel , meleg vízzel mossa le az összes részt.
4. Öblítse le az összes részt tiszta vízzel
5. Rázza le a felesleges vizet, és függőleges helyzetben hagyja megszáradni
6. Ha az inhalációs kamra megszáradt visszahelyezi az alapkorongot szilárdan.

**Kérjük, vegye figyelembe:**

A légkamra legfeljebb 12 alkalommal tisztítható mosogatógépben

Főzés: az AirChamber akár 12-szer is kifőzhető.

Helyezze az AirChamber egyes részeit forrásban lévő vízbe 5 percig. Használjon tiszta edényt és friss ivóvizet. Csak vízben forralja.

Forralás után mossa le a használat előtti tisztítási útmutató szerint

Ha nem világos, hogyan kell tisztítani az AirChamber-t, kérjük, kérjen segítséget egészségügyi szakembertől.

Cserélje ki 12 hónapon belül.

Az AirChamber az általános hulladékkal együtt kidobható.

**Szilikon arcmaszok:**

A szilikon arcmaszokot a légkamrához kell csatlakoztatni ahhoz, hogy egy adagoló pipa a levegővel kevert gyógyszert a beteg légútjába juttassa.

1. Öblítse le a maszkot tiszta meleg vízzel
2. Adjon lágy mosószert a vízhez, és mossa le a maszkot. Erős savas vagy lúgos tisztítószerek nem ajánlottak.
3. Alaposan öblítse le a maszkot tiszta vízben a mosószer eltávolításához.
4. Mosás után hűtse le és szárítsa meg a maszkot.

**Fertőtlenítés:**

Gőzsterilizálás: Autoklávban 134° C-on 4 percig. Az autokláv ciklusok max. száma maszkonként 50

Forrás: helyezze a maszkot erősen forrásban lévő vízbe legalább 7 percre

Tárolás: Napfénytől védve tárolandó

**Garancia:** 2 év

**Gyártó:** Medical Decvelopments International Limited ABN 14 106 340 667, 4Caribbean Drive, Scoresby, Victoria, 3179 Australia

**Forgalmazó:** AIM-Medical Kft. 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2.

Tel: +36 1 4146 491 email: info@aim-medical.hu